

# Bruksanvisning for Ribbond® bindings og forsterkningsnett

Ribbond-THM, Ribbond Ultra-THM,  
Original Ribbond

## Innhold:

Ribbons grunnpakke inneholder:  
Ribbond forsterkningsnett og saks.

Ribbons refillpakke inneholder:  
Ribbond forsterkningsnett.

Ribbond forsterkningsnett brukes til forsterkning av dentalresiner.

## Forholdsregel:

Ikke ta på Ribbond forsterkningsnettet (hverken med hender eller med latekshansker) før resinet legges. Bruk pinsett, tang, eller bomullshansker.

Når resinet er lagt, skal Ribbond nettet behandles på samme måte som resinet.

## Binding av Ribbond forsterkningsnett til komposittfylling:

Fukt forsterkningsnettet med umettet tetningsresin. Innstøp Ribbond forsterkningsnettet under et lag av uherdet, men mett kompositt fyllingsmateriale.

## Binding av Ribbond nettet til akryl:

Fukt Ribbond nettet med en lett blanding av væske og pulver. Innstøp Ribbond forsterkningsnettet under et lag av uherdet akryl.

Dekk Ribbond nettet med et mett komposittmateriale eller akryl.

**Kast:** Ingen spesielle hensyn

## Kun til profesjonelt bruk

**Ribbond® Bondable Reinforcement Ribbon**

Made in the USA

US Patent - 9138298 Europe - 2731537

Germany - 6020120439866 - Japan - 特許第5922770号



Ribbond Inc.  
1904 Third Ave Suite 330  
Seattle, WA 98101 USA  
Tel: 206-340-8870, [ribbond@ribbond.com](mailto:ribbond@ribbond.com)  
[www.ribbond.com](http://www.ribbond.com)



European Representative:  
Sigma Dental Systems  
Heideland 22  
D-24976 Handewitt  
Germany